

グラスマスク Glass & Mask 取扱説明書

この度は、Glass & Mask をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み下さい。
この説明書は、読み終わった後も大切に保管して下さい。

- セット内容：○ゴーグル本体・・・1個
 ○交換用マスク・・・1袋（10枚入）
 ○携帯用袋・・・1枚
 ○ディスプレイ用マスク・・・1枚
 ○説明書・・・1部
 ○型板（テンプレート）・・・1枚

※ゴーグル本体及びマスクの各部位の名称については、パッケージ裏をご参照下さい。

警告

- ◆この製品は、衝撃などから目を保護することを目的とした物ではありません。
- ◆レンズの細かなスリ傷は視界の妨げになる可能性があります。
- ◆自動車、バイク、自転車など乗り物の運転時には使用しないで下さい。


注意

- ◆高温になる場所に置かないで下さい。変形、破損の原因になります。
- ◆レンズが汚れた時はメガネ拭き等で拭き取って下さい。あまり強くこすると、くもり防止効果が低下する恐れがあります。またスポンジ部分の汚れは、かたく絞った布等で優しく拭き取って下さい。（有機溶剤使用不可）
- ◆くもり防止効果の妨げとなりますので、レンズ部分を水道水などで洗い流さないで下さい。
- ◆著しいレンズのキズ、またピンが破損した状態での使用は目を傷つけるおそれがありますのでおやめ下さい。
- ◆乳幼児の手の届く場所に置かないで下さい。
- ◆ゴーグルとマスクをつないだ状態で、ゴーグル及びマスクを強く引っ張りますと、接続部分に負荷がかかり変形や破損につながりますのでおやめ下さい。
- ◆非装着時はレンズを下に向けずに、風通しの良い直射日光の当たらない場所で保管して下さい。また、持ち運び時は付属の専用袋に入れて下さい。
- ◆ご自身による修理または改造を行うことは、安全上の問題がありますのでおやめ下さい。
- ◆本来の用途以外の目的に使用しないで下さい。有害な粉塵やガスなどを防ぐ目的での使用はできません。
- ◆マスク本体は使いきり用です。洗濯などによる再利用はできません。
- ◆マスクのにおいにより気分が悪くなった場合、及びかぶれ、かゆみ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止し医師にご相談下さい。
- ◆火気のそばでのご使用はおやめ下さい。
- ◆使用後の交換用マスクは地方自治体の区分に従い処理を行って下さい。
- ◆本製品は外気より花粉、細菌等が粘膜へ付着することを低減する為のものであり、100%の付着防止を保証したものではありません。
- ◆商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- ◆付属の型板（テンプレート）を使用し、マスクを加工する際には、刃物で手を切らないようお気をつけ下さい。
- ◆経年変化により変色・変形する場合があります。


※当社ではお客様の不注意によるいかなる事故や損害、または用途以外の使用方法での損害などが生じても一切の責任を負いかねますのでその旨ご了承下さい。

ご使用方法

1. ゴーグルとマスクの接続方法

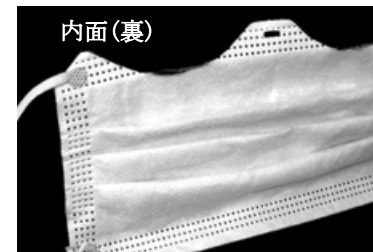

マスクの表裏*を確認します。

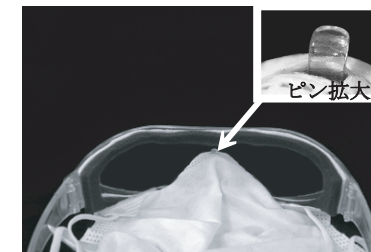

マスクの裏を上にして、マスクのスリットをゴーグルのピンに通して接続完了です。

*マスクの表裏の見分け方
マスクのプリーツを確認し、段がポケット状になっている面が内側になります。

接続完了後、マスクのスリット周辺が浮いてしまい、視界の妨げになる事を防ぐ為にレンズの縁に添わせる様に整えて下さい。

2. 装着の方法



① ゴーグルとマスクが接続された状態でゴーグルをかけます。



② マスクのヒモを耳にかけ、かけたヒモをつまんで拡大図の通りに柄の先端にかけます。



③ ゴーグルを軽く押さえながらマスクをあごの下までしっかりと広げ、ワイヤーの形を整えフィットさせます。

※②・③でマスクのヒモやマスク本体を強く引っ張りすぎないで下さい。
変形・破損の原因となりますので無理な力を加えないで下さい。

※ゴーグルを持ち運ぶ際には、付属の携帯袋をご利用下さい。また、ゴーグルとマスクが接続された状態で携帯袋に収納する場合は、レンズ内にマスクを折り込み、マスクを押さえる様に柄を畳んで下さい。

3. 付属の型板（テンプレート）について


付属の型板（テンプレート）は市販のマスクをグラスマスクタイプに加工する際に使用します。
（詳しいご使用方法は型板（テンプレート）に記載してありますのでご参照下さい。）

- ◆テンプレートはプリーツ加工の施された長方形のマスクにお使いいただけます。（ガーゼ、立体マスク等不可）
- ◆鼻部分に針金等の芯が入っているものは、上下を逆さまにしてご使用下さい。

※別売りマスクについて（Glass & Mask 専用 2WAYマスク）

下記の形状のマスクが入っております。

マスクのタイプ選択

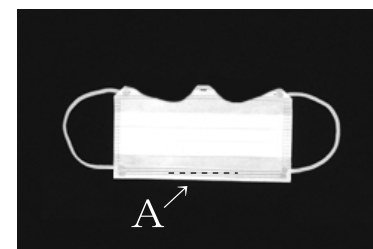

Aの示す点線部にワイヤーが入っています。マスクの上下の向きにより2通りの使い方をお選びいただけます。

Glass & Maskとして使う場合



説明書の「2. 装着の方法」に従い使用して下さい。フィットワイヤーはあごの下にきます。

通常耳かけマスクとして使う場合



マスク単体でご使用の場合は、フィットワイヤー（切込みがない方）を上にして使用します。